

압박용 밴드

# Multi-Fix<sup>®</sup> Easy Band II



## Indication

신체의 일부분을 탄력으로 압박하거나 잡아주는 기구.

- 근육이 긴장된 부위를 압박할 필요가 있을 경우
- 드레싱 치료 후 보호, 압박이나 고정이 필요한 경우
- 부종 부위 압박이 필요한 경우

사용부위: 상/하지

※본 제품은 낙상 방지 등을 위한 사지억제대 및 지혈목적으로서 사용되는 제품이 아님

판매처 : (주) 올소테크 대구광역시 동구 울암로 78

 ORTHOTECH

압박용 밴드

# Multi-Fix<sup>®</sup> Easy Band II

## 사용시 주의사항

### 1) 사용시 주의사항

- ① 반드시 본 제품의 사용목적 및 사용방법 숙지하여 사용한다.
- ② 제품의 이상 유무를 사용 전에 반드시 확인해야 한다.
- ③ 다음의 경우에는 사용하지 말아야 한다.
  - 오염이 되어 있는 경우
  - 파손이 되어 있는 경우
- ④ 자격을 갖춘 의료인 외의 사용을 금지한다.
- ⑤ 본 제품의 사용은 전문의의 지시에 따라서 사용되어야 하며, 사용방법이나 압박 기간 등을 임의로 하여 사용하였을 때, 이상이 발생할 수 있다.
- ⑥ 사용목적 이외의 사용을 금지한다. 특히, 낙상 방지 등을 위한 사지억제대로서 사용해서는 안 된다

### 2) 유효기간 : 해당사항 없음

### 3) 보관 조건 및 저장방법

실온의 건조한 곳에서 보관한다.

## 사용 방법

### 1) 사용전 준비사항 : 제품 외관 상에 이물질 및 파손 여부를 확인한다.

### 2) 사용방법

- ① 사용하고자 하는 신체 부위에 압박 밴드를 이용하여 넓게 압박하여 감싼다.
- ② 압박 밴드를 압박하고 잡아서 고정한 후, 추가적 압박을 주면서 압박 위치에 일정한 힘을 주어 고정하고자 할 때 필요한 만큼 적절한 위치에 압박 스트랩을 조절하여 고정한다.

### 3) 사용 후 보관 및 관리방법

1회용 이므로, 사용 후 폐기한다. (재사용 불가)

## 제품 정보

· 품목명 : 압박용밴드

· 신고번호 : 제신18-399호

· 치료재료코드 : BC1203AS

· 판매가 : 담당자 문의

· 모델명 : ET001-LS외 5품목

· 성능 : 사용설명서 참조

· 사용상 주의사항 : 사용설명서 참조

· 사용기한 : 해당없음/1회용 재사용 불가

· 적용 및 사용목적 : 사용설명서 참조

· 저장방법 : 실온보관

· 제조년월 : 별도표시

· 포장단위 : 1EA / 1PACK

· 해당 제품은 '의료기기'입니다. 1회용품

· 제조자 : (주)올소테크 대구시 동구 울암로78